



Криоустановка CSC Lasertech

Домашний крио-аппарат для охлаждения кожи

Руководство пользователя

Предупреждение

Уважаемый пользователь, спасибо за использование аппарата для охлаждения кожи. Чтобы использовать все функции аппарата, мы рекомендуем следующее:

- Внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего чтения и консультирования;
- Следуйте инструкциям для правильной установки и эксплуатации аппарата;
- Не снимайте и не меняйте никакие комплектующие аппарата;
- Запрещается любое изменение конструкции аппарата и его составных частей, за исключением авторизованных сервисных центров и специально обученных профессионалов;
- Свяжитесь с нами, если есть какие-либо проблемы во время работы аппарата;

Общие сведения

Профессиональный аппарат для охлаждения кожи специально предназначен для охлаждения кожи до, во время и после использования неинвазивного фракционного СО-лазера, лазера с переключением мощности, IPL или диодного лазера; чтобы обеспечить снятие боли для пациентов и избежать неприятных ощущений при лечении ожогов;

Охлаждающий аппарат для лица и тела



- Температура на выходе -20 °С
- Охлаждает кожу до онемения
- Предотвращает термические травмы
- Минимизирует боль при лечении лазером

Преимущества:

1. Аппарат может производить постоянный охлаждающий поток воздуха для кожи, чтобы свести к минимуму боль и термические травмы во время лазерной и IPL-терапии, а также обеспечивает временное обезболивание для косметических инъекций;
2. Скорость потока (холодный воздух) и время охлаждения можно регулировать с уровня 1 до уровня 7 и время охлаждения от 1 до 60 минут на экране в соответствии с ощущениями пациента;
3. Уровень охлаждения может быть до -20 °С, поэтому во время применения лазера или IPL-аппарата можно использовать высокую мощность для выполнения эффективных и быстрых процедур;
4. Большой 10,4-дюймовый сенсорный экран, предназначен для того чтобы указать все параметры процедуры. Гибкость в настройке и отсутствие дополнительных расходных материалов и затрат на обслуживание.

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ ВМЕСТЕ С АППАРАТОМ!